

BD Vacutainer®

l'hygiène et la qualité dès le prélèvement



Recueil et prélèvement des urines de 24 heures (conteneur 3 litres)



Pour que chacun vive en bonne santé


Recueil de l'urine sur 24 heures dans le conteneur de 3 litres



24h




Transfert depuis le conteneur de recueil vers le tube

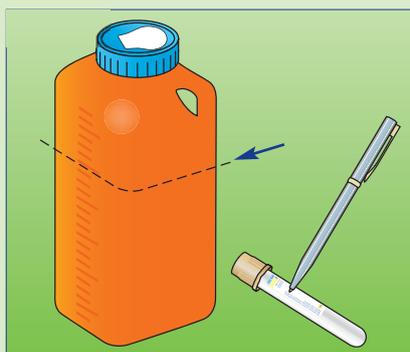

- 1 **Mentionner** sur l'étiquette du tube :
 - Les informations patient
 - Le volume total recueilli sur 24h.



- 2 **Homogénéiser** le conteneur de recueil.

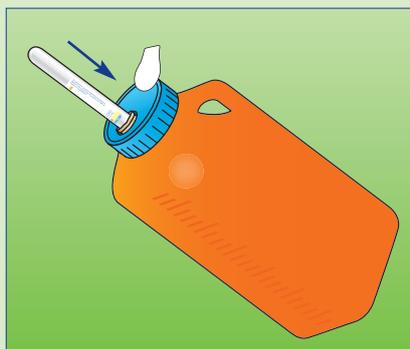

- 3 **Soulever** l'opercule autocollant. Insérer le tube et le percuter. Attendre la fin du remplissage et transmettre le tube au laboratoire.



- 4 **Replacer** l'opercule autocollant sur l'orifice du couvercle.

BD Diagnostics - Preanalytical Systems

Becton Dickinson France S.A.S. Siège social: 11, rue Aristide Bergès - B.P.4 - 38801 Le Pont de Claix Cedex.
Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 Euros.

BD, le logo BD et Vacutainer sont la propriété de Becton, Dickinson & Company. © 2011 BD - ABCOM F38190 - ME_Urine24h_A4_04/11_V02