

## AIDE AU PRELEVEMENT SANGUIN

TUBES Dans leur ordre de prélèvement		ANTICOAGULANT	ECHANTILLON PRELEVE	ECHANTILLON OBTENU APRES TRAITEMENT AU LABORATOIRE
Bleu		Citrate	Sang total citraté	Plasma « citraté »
Rouge		Aucun (Tube sec)	Sang total = Coagulum	Sérum
Vert		Héparine	Sang total hépariné	Plasma « hépariné »
Violet		EDTA	Sang total EDTA	Plasma « EDTA »
Jaune clair		ACD	Sang total ACD	Plasma « ACD »
Rose		Aprotinine	Sang total Aprotinine	Plasma « Aprotinine »
Gris		Fluorure de sodium/ oxalate de potassium	Sang total fluoré / oxalaté	Plasma « fluoré / oxalaté »
« Camouflage »		Streck	Sang total Streck	Sang total « Streck »
	Si dans le guide de prélèvement, il est seulement précisé « PLASMA », prélever un tube EDTA (violet) OU hépariné (VERT).			

**Si cela n'est pas indiqué, combien de tubes prélever ? (sur une base de tubes de 4 ml)**

Volume demandé	Sérum ou plasma	Sang total
1 ou 2 ml	1 tube	1 tube
3 à 4 ml	2 tubes	1 tube
5 ml	3 tubes	2 tubes

AIDE AU PRELEVEMENT SANGUIN			
Hôpital Louis Pasteur	LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE COMMUN CHARTRES-CHATEAUDUN		
PRE-EN30	Version n° : 1	Date d'application : 04/09/2019	Page 1/2
Rédacteur : MV	Vérificateur : AG/GL/CF/LBS	Valideur : BIO/DP	Approbateur : AG/LBS/MV
Ce document ne doit être ni modifié, reproduit ou diffusé sans l'autorisation des responsables Qualité ; seule la version électronique fait foi.			

## AIDE AU PRELEVEMENT SANGUIN

Gestion documentaire (réservée RQ/RQL)

Copie(s) de ce document :  Oui  Non

Localisation à renseigner			Nbr de copies émises
Secteur	Poste	Classeur	
Centre de prélèvement Chartres			1
Centre de prélèvement Chateaudun			1
THESI			1
ENNOV			1
GED Châteaudun			1
GED NGT			1
GED La Loupe			1
GED Henri EY			1

Traçabilité des modifications du document

Modifications du document				
Date	Mineure 	Majeure 	Chapître(s)/paragraphe(s) concerné(s)	Version du document concerné

AIDE AU PRELEVEMENT SANGUIN			
Hôpital Louis Pasteur	LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE COMMUN CHARTRES-CHATEAUDUN		
PRE-EN30	Version n° : 1	Date d'application : 04/09/2019	Page 2/2
Rédacteur : MV	Vérificateur : AG/GL/CF/LBS	Valideur : BIO/DP	Approbateur : AG/LBS/MV
Ce document ne doit être ni modifié, reproduit ou diffusé sans l'autorisation des responsables Qualité ; seule la version électronique fait foi.			