

Recueil et transfert des urines de 24 h


Recommandations d'utilisation

Système BD Vacutainer® :
recueil, transport et conservation
de l'urine

EXT-BD-04 V2



A • RECUEIL

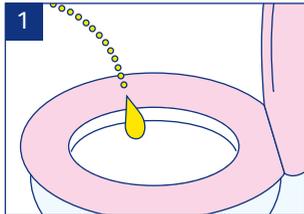

Au lever, urinez la totalité de la vessie dans les toilettes.



Durant les 24 heures suivantes, recueillez la totalité des urines dans le conteneur de recueil.



B • TRANSFERT DANS LE TUBE



Mesurez le volume total recueilli sur 24 h à l'aide des graduations du conteneur.

Homogénéisez le conteneur.



Soulevez l'étiquette. Insérez le tube à fond et attendez la fin du remplissage.



Remplacez l'étiquette sur l'orifice du couvercle. Identifiez le tube, et indiquez le volume recueilli. Transmettez l'échantillon au laboratoire.

BD - 11, rue Aristide Bergès - ZI des Iles - BP4 - 38801 Le Pont de Claix Cedex
Tél : 04 76 68 36 36

bd.com/fr

BD, le logo BD et Vacutainer sont des marques commerciales de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales.
© 2022 BD. Tous droits réservés. ME-UrineConteneur. 02/22. AB•Com. Becton Dickinson France S.A.S. au capital de
64 719 915 € / RCS Grenoble B 056 501 711 / Siret 056 501 711 00115.

